

Chapitre 2 : Configurer les iPads

Une fois l'application Assess téléchargée, configurez-la sur les deux iPads. Cette étape est essentielle pour plusieurs raisons :

- S'assurer que les iPads sont connectés entre eux afin de pouvoir échanger des données
- Afficher les stimuli de façon standardisée
- Contribuer au bon fonctionnement de Q-interactive.
- Éliminer les distractions qui pourraient survenir pendant l'évaluation.

Étape 1



Ouvrez l'application Réglages, située sur l'écran d'accueil de l'iPad.

Étape 2

Réglez vos iPads conformément au tableau suivant. L'application Assess utilise le Wi-Fi pour connecter entre eux les iPad patient et professionnel. Vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi pour télécharger et synchroniser les évaluations. Il n'est en revanche pas nécessaire d'être connecté à un réseau Wi-Fi pour administrer les évaluations, mais le Wi-Fi doit être activé (bouton vert) sur les deux appareils.

IPad du professionnel	IPad du patient	Réglages	Menu	Choix
•	•	Wi-Fi	Activer le Wi-Fi	Sélectionner le réseau
•	•	Général	Clavier	Désactiver les majuscules automatiques
•	•	Général	Clavier	Désactiver la correction automatique
	•	Luminosité et affichage	Luminosité	Maximale
	•	Luminosité et affichage	Night Shift	Désactiver
	•	Luminosité et affichage	True Tone	Désactiver
•	•	Luminosité et affichage	Verrouillage automatique	15 Minutes
	•	Accessibilité	Affichage et taille du texte	Désactiver la luminosité automatique

Chapitre 3 : Créer une session d'évaluation

Votre email de bienvenue vous permet de commencer en configurant vos identifiants de connexion.

Étape 1

Le bouton "Définir un mot de passe et se connecter" ouvre la page permettant de paramétrer votre mot de passe.

Après avoir créé le mot de passe, paramétré l'authentification à deux facteurs et accepté les conditions générales de Q-interactive, vous êtes prêt à créer une session d'entraînement.

Étape 2



Depuis l'onglet "Tableau de bord", cliquez sur le bouton "Évaluation d'entraînement", pour créer un sujet d'entraînement et l'enregistrer.

Étape 3




Sélectionnez la batterie de votre choix en cliquant sur le bouton "Ajouter", puis cliquez sur le bouton "Suivant".

Étape 4



Définissez la date et l'heure de l'administration (facultatif) et cliquez sur le bouton "Terminer".

Étape 5

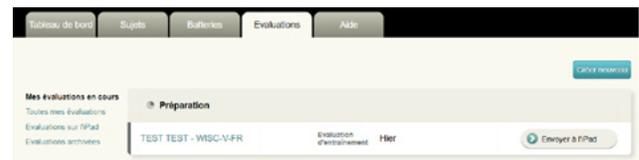


Cliquez sur le bouton "Envoyer à l'iPad" et vous serez prêt à vous connecter aux iPads !

Étape 6

Connectez-vous aux deux iPads avec les mêmes identifiants de connexion que ceux établis précédemment pour commencer l'administration.




Étape 7

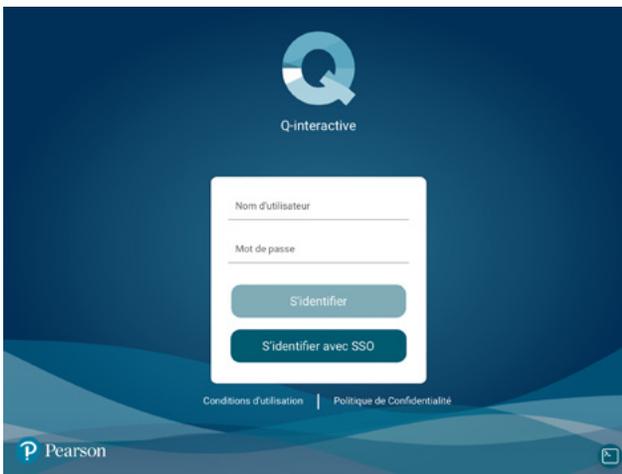

Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Prévoyez 10 à 20 minutes pour le téléchargement complet de votre bibliothèque de tests.

Vos iPads se connecteront l'un à l'autre lorsque vous commencerez votre évaluation, s'ils ont été configurés correctement.

Étape 8

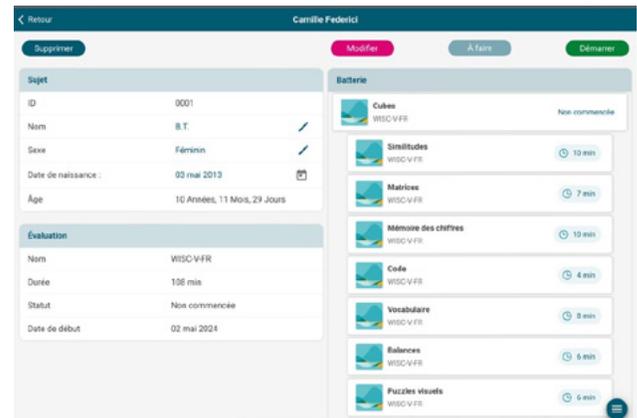

Appuyez sur le bouton vert "Démarrer" pour commencer l'évaluation. Les sessions d'entraînement ont toutes les fonctionnalités des sessions d'évaluation réelle, à l'exception du calcul des scores qui est désactivé (la note par défaut de toutes les épreuves est de zéro).

Félicitations ! Vous êtes maintenant prêt.e.s à utiliser Q-interactive.

Consultez les modules de formation Q-interactive, disponibles depuis votre Tableau de bord, pour des instructions plus détaillées.

+33 (0)1 43 62 30 01 | www.pearsonclinical.fr

Copyright © 2023 Pearson Education, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Pearson and Q-interactive are trademarks, in the US and/or other countries, of Pearson plc. iPad is a registered trademark of Apple Inc. C5429 SR 05/23