

# Cléo

---

COMMUNIQUER, LIRE ET ÉCRIRE  
POUR APPRENDRE



## LA BATTERIE DE LANGAGE NOUVELLE GÉNÉRATION

---

Batterie d'évaluation du développement  
du langage écrit et oral totalement informatisée






# CLéA, LE SEUL BILAN QUI VOUS PERMET DE RETRACER LE PARCOURS DÉVELOPPEMENTAL DANS L'ACQUISITION DU LANGAGE DE VOTRE PATIENT.

La batterie permet de retracer les étapes du développement linguistique des enfants et des adolescents présentant des troubles du langage écrit et oral.

## CLéA C'EST :

- **C**ommuniquer avec le langage oral,
- **L**ire,
- **é**crire,
- **A**pprendre en utilisant ses compétences en langage oral et écrit

## UNE STRUCTURE EN 4X3 :

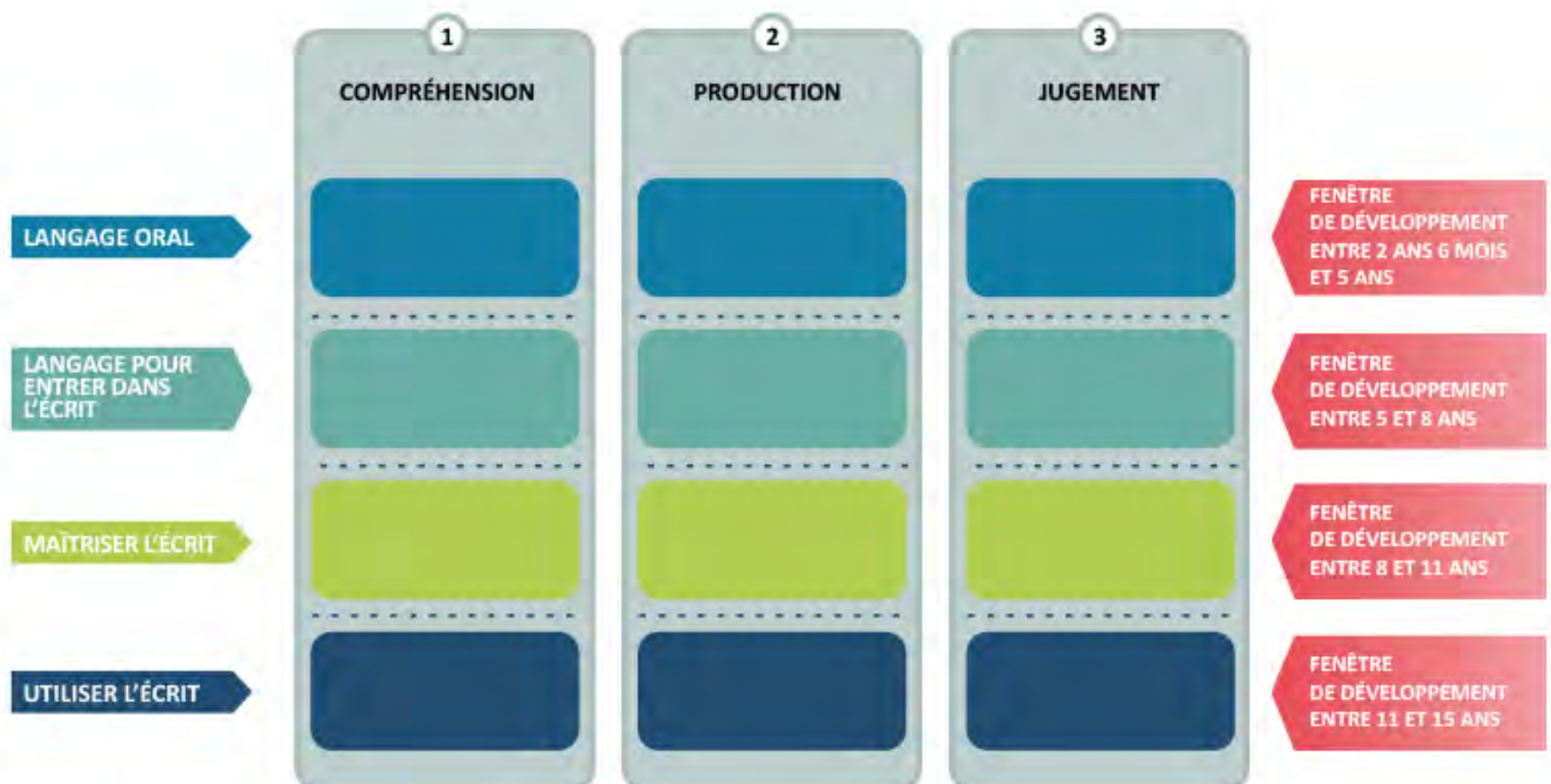



## UNE STRUCTURE EN 4X3 :

### 4 ÉTAPES DU LANGAGE :

- langage oral,
- langage pour entrer dans l'écrit,
- maîtriser l'écrit,
- utiliser l'écrit.

### 3 ÉPREUVES POUR COMPRENDRE ET ANALYSER LA FONCTIONNALITÉ DU LANGAGE :

- compréhension,
- production,
- jugement.



TOUS LES ITEMS SONT MÉLANGÉS AU SEIN D'UNE MÊME ÉPREUVE :

**LEXICAUX,  
MORPHOSYNTAXIQUES,  
PHONOLOGIQUES,  
RESSOURCES COMPENSATOIRES\*.**

\* Permet de mesurer les capacités de compensation dans un contexte de troubles du langage oral et / ou écrit.



Le bilan est fondé sur les théories **dynamiques, émergentistes et fonctionnalistes** de l'acquisition du langage.

CLÉA vous propose une évaluation transversale qui permet de répondre à des problématiques clés :

- Quelles sont les **fragilités** survenues au cours du développement du langage ?
- À quelles **étapes** sont apparues ces fragilités ?
- Quelles sont les **conséquences** sur la construction du langage ?

## UNE PASSATION CLÉ EN MAIN :

La sélection des modules à administrer est automatique selon l'âge de l'enfant. Pour obtenir les résultats, **la totalité des modules sélectionnés est à administrer.**

## UN PARCOURS DÉVELOPPEMENTAL ÉVALUÉ :

Un ordre fixe dans la passation est imposé :

**1**

L'enfant accède à la Compréhension

**2**

L'enfant accède à la Production

**3**

L'enfant accède au Jugement

### PASSATION

De 15 mn pour les 2 ans 6 mois / 4 ans 11 mois  
à 1 h pour les 10 ans 11 mois

### CORRECTION

Entièrement automatisée  
(enregistrement des clics  
ou des cotations 0/1 du clinicien)

### INDICATIONS

Bilan et suivi d'enfants et adolescents  
présentant des dysfonctionnements  
du langage oral et/ou écrit



## LES APPORTS POUR VOTRE PRATIQUE :

- des résultats disponibles instantanément,
- différents niveaux d'analyse :

### ANALYSE ADMINISTRATIVE



DONNÉES CHIFFRÉES

### ANALYSE CLINIQUE



PROFIL DU PATIENT

- le compte rendu est semi-automatisé et peut-être modifié à tout moment.





## POINTS FORTS :

- un âge d'application large : de 2 ans 6 mois à 14 ans 11 mois,
- un bilan totalement informatisé : ludique et attractif,
- analyses statistiques des résultats : fiabilité statistique et richesse clinique,
- un compte rendu semi-automatisé : vous économisez 50% de votre temps.

### INNOVATION

CléA est **le seul bilan** qui vous permet de retracer le parcours développemental dans l'acquisition du langage de votre patient.

## COMMENT CELA FONCTIONNE ?

Après avoir passé commande :

- **je reçois un e-mail** sur l'adresse renseignée sur le bon de commande,
- **je télécharge le logiciel** à l'aide du lien présent dans l'e-mail,
- **j'installe le logiciel** sur mon ordinateur,
- **je me connecte au logiciel** grâce aux identifiants communiqués dans l'e-mail.



## ASTUCE :

**Administrez-vous la première passation :**

- pour une découverte de l'outil,
- une prise en main optimale,
- et une meilleure fluidité dans votre pratique clinique.

POUR TOUTE DEMANDE D'INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ LE CONSEIL CLINIQUE :

mail: [conseilclinique@ecpa.fr](mailto:conseilclinique@ecpa.fr)

tél. : +33 (0)1 43 62 30 01

[www.ecpa.fr](http://www.ecpa.fr)

**Frédéric Pasquet**

- Orthophoniste, Maître de Conférences en Sciences du Langage et Directeur Pédagogique du Département d'Orthophonie à l'Université de Rouen  
- UFR Médecine/Pharmacie



ECPA  
15, rue Henri Rol Tanguy  
93 100 Montreuil